

● 高さ調整


アームサポートの高さを4段階に調整することができます。

● 跳ね上げ

車いすの乗り降りなど、アームサポートが妨げになる場合は、アームサポートを跳ね上げることができます。

高さ調整のしかた

- 1 ロックレバーを引き上げます。

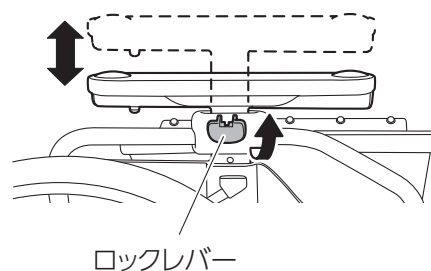

- 2 アームサポートを上下に調整します。

- 3 ロックレバーを降ろして、アームサポートを少し上下に動かすと、ロックの位置が合った段でアームサポートがロックされます。


- 4 アームサポートを揺らして、確実にロックされていることを確認します。

跳ね上げかた・戻しかた

- 1 ロックレバーを引き上げながら、アームサポートを跳ね上げます。

要 点

跳ね上げた状態で固定する機能はありません。一番後ろまで跳ね上げてください。

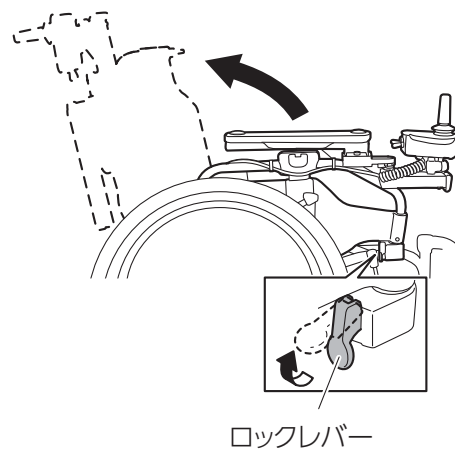

- 2 元の位置に戻すと、「カチッ」と音がしてアームサポートがロックされます。