

● 高さ調整


アームサポートの高さを5段階に調整することができます。

● 跳ね上げ

車いすの乗り降りなど、アームサポートが妨げになる場合は、アームサポートを跳ね上げることができます。

高さ調整のしかた

- 1 ロックレバーを引き上げながら、アームサポートを上下に調整します。

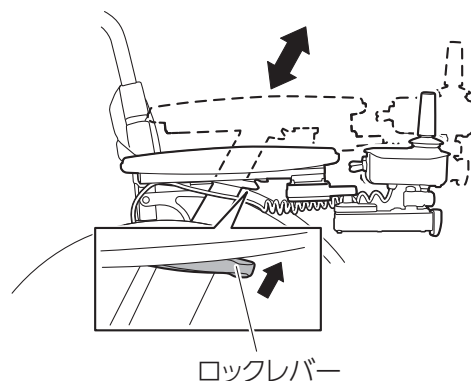


- 2 ロックレバーを放して、アームサポートを少し上下に動かすと、ロックの位置が合った段でアームサポートがロックされます。

- 3 アームサポートを揺らして、確実にロックされていることを確認します。

跳ね上げかた

アームサポートを跳ね上げます。

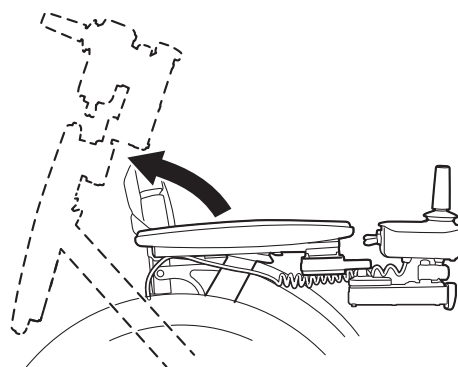

要点

跳ね上げた状態で固定する機能はありません。一番後ろまで跳ね上げてください。